

Producent

Scholz Medical GmbH
 Robert-Bosch-Strasse 1
 83052 Bruckmuehl
 Niemcy
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
 +49 8062 8070801



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących produktów

Opis	Nr art.	Kod Basic UDI-DI	Klasa	Zasada
Nożyczki Braun-Stadler 145 mm	TAET1400	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/ostre, zakrzywione 145 mm	TABC4444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/ostre, proste 130 mm	TABC3433	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/ostre, zakrzywione 145 mm	TABC3444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/zaokrąglone, zakrzywione 145 mm	TABC4244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/zaokrąglone, proste 130 mm	TABC3233	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne ostre/zaokrąglone, proste 145 mm	TABC3244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione 145 mm	TABC4144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki chirurgiczne zaokrąglone/zaokrąglone, proste 145 mm	TABC3144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Waldmann 180mm	TAET1700	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Spencer, zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione, 110mm	TABC1122	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Spencer, zaokrąglone/zaokrąglone, proste, 120mm,	TABC8022	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki sprężynowe typu Vannas, cienkie, zakrzywione, 80 mm	SIBC4012	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki sprężynowe typu Westcott, zaokrąglone/zaokrąglone, 120 mm	SIBC4010	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do ligatury zakrzywione 90 mm ostre/ostre	TABC1011	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do ligatury ostre/ostre, zakrzywione 115 mm	TABC1077	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do ligatury ostre/ostre, proste 100 mm	TABC1100	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do ligatury ostre/ostre, proste 90 mm	TABC1000	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do ligatury ostre/ostre, proste 115	TABC1066	426052621TABC01WZ	Ila	7

mm				
Nożyczki Metzenbaum zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione 145 mm	TABC6055	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Metzenbaum zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione 165 mm	TABC6833	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Metzenbaum zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione 180 mm	TABC6066	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Metzenbaum zaokrąglone/zaokrąglone, zakrzywione 180 mm, Wersja RK	TABC6066- RK	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Metzenbaum zaokrąglone/zaokrąglone, proste 145 mm	TABC6044	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Busch, 160 mm, niebieskie	TABC7977	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Busch, 160 mm, różowe	TABC7978	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Schumacher, 160 mm	TAET1500	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Noyes 125 mm	TAOC4822	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki Lexer, wąskie, 165 mm	TABC5911	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nożyczki do paznokci, 95 mm	TA-0010	426052621TABC01WZ	Is	5

Ostrzeżenia / środki ostrożności

W przypadku nietolerancji tlenu etylenu lub stali nierdzewnej przed użyciem produktu należy skonsultować się z personelem medycznym.

Produkt nie może być stosowany w obrębie centralnego układu krążenia lub centralnego układu nerwowego.

Nożyczki mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem do celów medycznych przez przeszkolony, wykwalifikowany personel medyczny.

Niewłaściwe przechowywanie lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia u pacjenta.

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w temperaturze pokojowej, w przeciwnym razie nie można zagwarantować sterylności produktu.



Nożyczki należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych nieupoważnionych osób.

Należy zawsze przestrzegać określonego czasu użytkowania. Zużyte produkty należy utylizować.

Użycie nadmiernych sił mechanicznych przez użytkownika może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia pacjentów.

Ruchome części i ich niezamierzony ruch mogą spowodować obrażenia użytkownika.

W przypadku ponownego użycia nożyczek może dojść do skażenia biologicznego i zwiększenia ilości bakterii. To samo dotyczy przypadków użycia narzędzi z uszkodzonym opakowaniem.



Są to narzędzia tnące; użytkownik może się skaleczyć lub w inny sposób zranić, jeśli ostrza będą obsługiwane w niewłaściwy sposób lub w przypadku kontaktu z nimi.

Niewłaściwa utylizacja narzędzi prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. Należy zapoznać się z sekcją dotyczącą prawidłowej utylizacji.

Przeznaczenie

Nożyczki służą do cięcia i przygotowywania różnych rodzajów tkanek i materiałów oraz umożliwiają precyzyjną pracę. Mogą być używane do cięcia na ostro, do rozsuwania i do rozcinania różnych materiałów. W zależności od głębokości korpusu, uchwyty i ostrza są długie, zakrzywione, ustawione pod kątem i różnie szlifowane. Ze względu na liczne możliwe zastosowania, powstało wiele różnych rodzajów nożyczek.

Nożyczki to ręczne narzędzia chirurgiczne służące do cięcia tkanki ciała, materiału opatrunkowego lub innego materiału. Nożyczki składają się z trzech części: ostrzy tnących z krawędzią tnącą i grzbietem ostrza, części rękojeści z pierścieniami lub sprężynami oraz części blokującej ze śrubą (do otwierania i zamykania nożyczek). Nazwy nożyczek wynikają z obszaru ich zastosowania lub odpowiadają wynalazcy.

Główne różnice między nożyczkami to

- kształt ostrzy (proste, zakrzywione, pod kątem),
- długość i szerokość ostrza,
- wykonanie krawędzi tnącej (gładka lub ząbkowana),
- wykonanie końcówek ostrzy, które mogą być ostre, zaokrąglone lub w kształcie łopatki, lub kombinacją ostre / ostre, zaokrąglone / zaokrąglone lub ostre / zaokrąglone,
- wykonanie pierścieni, które mogą być identyczne lub różne.

Odpowiednie wersje poszczególnych produktów można znaleźć w opisie na liście produktów.

Wskazanie: Stosowanie podczas rutynowych zabiegów chirurgicznych w szpitalach lub gabinetach lekarskich.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku cech ogólnej nieoperacyjności, wcześniej wspomnianych nietolerancji lub zastosowań na centralnym układzie krążenia i układzie nerwowym.

Grupa docelowa pacjentów: Sterylne nożyczki mogą być stosowane u wszystkich grup pacjentów

Docelowi użytkownicy: Nożyczki mogą być używane wyłącznie przez przeszkolony, wykwalifikowany personel medyczny.

Charakterystyka działania

Nożyczki posiadają sterylną barierę.

Prawidłowe użycie

Nożyczki mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem do celów medycznych przez przeszkolony, wykwalifikowany personel medyczny. Nożyczki są używane tylko przez krótki czas, tj. do kilku godzin.

Sterylność

W przypadku uszkodzenia sterylnego opakowania nożyczki nie mogą być używane. Sterylne opakowanie można otworzyć wyłącznie bezpośrednio przed użyciem. Jeśli sterylne opakowanie zostanie przypadkowo otwarte lub uszkodzone, należy użyć innego produktu w nienaruszonym sterylnym opakowaniu.

Produkt jest sterylizowany przy użyciu tlenu etylenu.



Ponowne użycie produktu

Nożyczki są przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowna sterylizacja jest zabroniona, ponieważ nie istnieje zatwierdzona procedura dla tego procesu.

Utylizacja

Przy utylizacji potencjalnie skażonych produktów należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania zakażeniom i postępowania z zagrożeniami mikrobiologicznymi. Dotyczy to w szczególności nożyczek, które miały kontakt z tkankami lub płynami ustrojowymi. Podczas utylizacji należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju. Nasze instrumenty są dopuszczone do utylizacji poprzez Scholz Recycling System (SReS®).

Data wydania instrukcji obsługi [jeśli została zmieniona]: 20.05.2025

Wersja: 3.0

Informacja: Wszystkie poważne incydenty związane z wyrobem zgłaszane są producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.