

Návod k použití lékařských nůžek od společnosti Scholz Medical GmbH

Výrobce

Scholz Medical GmbH
 Robert-Bosch-Strasse 1
 83052 Bruckmuehl
 Německo
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
 +49 8062 8070801



Tento návod k použití se vztahuje na následující výrobky

Popis	Č. výrobku	Basic-UDI-DI	Třída	Předpis
Nůžky Braun-Stadler 145 mm	TAET1400	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/hrotnaté zahnuté 145 mm	TABC4444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/hrotnaté rovné 130 mm	TABC3433	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/hrotnaté rovné 145mm	TABC3444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/zahnuté tupé 145 mm	TABC4244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/rovné tupé 130 mm	TABC3233	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky hrotnaté/rovné tupé 145 mm	TABC3244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky tupé/zahnuté tupé 145 mm	TABC4144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nůžky tupé/rovné tupé 145 mm	TABC3144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Waldmann 180 mm	TAET1700	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Spencer, tupé/tupé, zahnuté, 110 mm	TABC1122	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Spencer, tupé/tupé, rovné, 120 mm,	TABC8022	426052621TABC01WZ	Ila	7
Pružinové nůžky Vannas, jemné, zahnuté, 80 mm	SIBC4012	426052621TABC01WZ	Ila	7
Pružinové nůžky Westcott, tupé/tupé, 120 mm	SIBC4010	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Ligatura zahnuté 90 mm hrotnaté/hrotnaté	TABC1011	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Ligatura hrotnaté/hrotnaté zahnuté 115 mm	TABC1077	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Ligatura hrotnaté/hrotnaté rovné 100 mm	TABC1100	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Ligatura hrotnaté/hrotnaté rovné 90 mm	TABC1000	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Ligatura hrotnaté/hrotnaté rovné 115 mm	TABC1066	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Metzenbaum tupé/zahnuté tupé 145 mm	TABC6055	426052621TABC01WZ	Ila	7

Nůžky Metzenbaum tupé/zahnuté tupé 165 mm	TABC6833	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Metzenbaum tupé/zahnuté tupé 180 mm	TABC6066	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Metzenbaum tupé/zahnuté tupé 180 mm– verze RK	TABC6066-RK	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Metzenbaum tupé/ rovné tupé 145 mm	TABC6044	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Busch, 160 mm, modré	TABC7977	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Busch, 160 mm, růžové	TABC7978	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Schumacher, 160 mm	TAET1500	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Noyes 125 mm	TAOC4822	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky Lexer, úzké,165 mm	TABC5911	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nůžky na nehty, 95 mm	TA-0010	426052621TABC01WZ	Is	5

Upozornění / bezpečnostní opatření

V případě nesnášenlivosti Nickel nebo nerezové oceli je třeba se před použitím výrobku poradit s lékařem.

Výrobek se nesmí používat u centrálního oběhového systému a centrálního nervového systému.

Nůžky smí v lékařských oborech používat k určenému účelu pouze vyškolený personál se zdravotnickým vzděláním.

Nesprávné skladování nebo manipulace, které jsou v rozporu s určeným použitím, může mít za následek poranění pacienta.

Uchovávejte na místě chráněném před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením při pokojové teplotě, jinak nelze zaručit sterilitu výrobku.



Nůžky vždy uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.

Vždy je třeba dodržovat stanovené doby použití. Výrobky po životnosti je nutné zlikvidovat.

Nadměrné mechanické síly vyvíjené uživatelem mohou výrobek poškodit a způsobit poranění pacientů.

Pohyblivé části a neúmyslný pohyb těmito částmi mohou způsobit poranění uživatele.

Opakované použití nůžek může vést k biologické kontaminaci a zvýšení mikrobiálního znečištění. Totéž platí, pokud jsou výrobky používány navzdory poškozenému obalu.



Jedná se o řezný nástroj; při nesprávné manipulaci s čepelemi nebo při dotyku se uživatel může pořezat nebo jinak poranit.

Nesprávná likvidace nástrojů vede ke znečištění životního prostředí. Viz oddíl o správné likvidaci.

Stanovení účelu použití

Nůžky se používají ke stříhání a preparaci různých druhů tkání a materiálů a umožňují precizní práci. Lze je použít k ostrému oddělení, k roztlačování a k odstříhnutí různých materiálů. V závislosti na hloubce těla jsou rukojeti a čepele dlouhé, zahnuté, zkosené a různě broušené. Vzhledem k mnoha možnostem použití bylo vyvinuto mnoho různých typů nůžek.

Nůžky jsou ruční chirurgické nástroje, které slouží ke stříhání tělesné tkáně, šicího materiálu nebo jiného materiálu. Tyto nůžky se skládají ze tří částí: břitů s ostřím a hřbetem, rukojeti s kroužky nebo pružinami a zajišťovací části se šroubem (k otevírání a zavírání nůžek). Názvy nůžek vyplývají z oblasti jejich použití nebo odpovídají jejich vynálezcům.

Hlavní rozdíly mezi těmito nůžkami jsou

- - ve tvaru branží (rovné, zahnuté, zahnuté v kloubu, zkosené),
- v délce čepele a šířce,
- v provedení ostří (hladké nebo se zuby),
- v provedení konců čepele, které mohou být hrotnaté, tupé nebo ve tvaru špachtle, popř. kombinace konců čepelí hrotnatá/hrotnatá, tupá/tupá nebo hrotnatá/tupá,
- v provedení kroužků, které mohou být stejné či nestejně

Příslušné verze výrobků jsou uvedeny v popisu výrobků v seznamu výrobků.

Indikace: Použití pro běžné chirurgické zákroky v nemocnicích nebo ordinacích lékařů.

Kontraindikace: Použití je kontraindikováno v případě celkové nesnášenlivosti, výše uvedených intolerancí nebo použití u centrálního oběhového a nervového systému.

Cílová skupina pacientů: Sterilními nůžkami lze ošetřovat všechny skupiny pacientů.

Určení uživatelé: Nůžky smí používat pouze vyškolený, zdravotnický kvalifikovaný personál.

Charakteristika

Pro nůžky je k dispozici sterilní bariéra.

Správné použití

Nůžky smí v lékařských oborech používat k určenému účelu pouze vyškolený personál se zdravotnickým vzděláním. Nůžky se používají pouze krátkodobě, tj. po dobu maximálně několika hodin.

Sterilita

Pokud je sterilní obal poškozen, nůžky se již nesmí používat. Sterilní obal se smí otevřít pouze bezprostředně před použitím. Pokud je sterilní obal náhodně otevřen nebo poškozen, použijte jiný výrobek s neporušeným sterilním obalem.

Výrobek je sterilizován procesem ethylenoxidu.



Opakované použití výrobku

Nůžky jsou určeny k jednorázovému použití. Opětovná sterilizace je zakázána, protože pro tento proces neexistuje žádný validovaný postup.

Likvidace

Při likvidaci potenciálně kontaminovaných produktů je třeba dodržovat předpisy pro prevenci infekce a řešení mikrobiologických rizik. To se týká zejména nůžek, které přišly do kontaktu s tkání nebo tělesnými tekutinami.

Při likvidaci je třeba dodržovat zákony a předpisy dané země. Naše výrobky mají licenci na likvidaci prostřednictvím systému Scholz Recycling System (SReS®).

Datum vydání návodu k použití [je-li revidován: 20.05.2025

Verze: 3.0

Poznámka: Všechny závažné události týkající se výrobku hlase výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž se uživatel a/nebo pacient nachází.