

Návod k použití lékařských svorek na hadice od společnosti Scholz Medical GmbH

Výrobce

Scholz Medical GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
83052 Bruckmuehl
Německo
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
+49 8062 8070801



Tento návod k použití platí pro následující produkty.

Popis	Katalogové číslo	Základní UDI-DI:	Třída	Pravidlo
Svorka na hadice, hladké čelisti, 180 mm, bez zubů	TAAN9111	426052621TAAN01YH	Is	5
Svorka na hadice, vroubkované čelisti, 180 mm	TAAN9122	426052621TAAN01YH	Is	5
Svorka na hadice, vroubkované čelisti, 200 mm	TAAN9133	426052621TAAN01YH	Is	5
Svorka na hadice, hladké čelisti, 165 mm	TAAN9099	426052621TAAN01YH	Is	5
Svorka na hadici, silné provedení, 145 mm	TAAN9088	426052621TAAN01YH	Is	5
Svorka na hadici, plast, 120 mm	TAAN9011	426052621TAAN01YH	Is	5

Varování/bezpečnostní opatření

Pokud existuje přecitlivělost na ethylenoxid nebo nerezovou ocel, doporučuje se před použitím produktu konzultace s lékařem.

Výrobek nesmí být používán na centrální oběhový systém ani na centrální nervový systém.

Svorky na hadice smí být používány výhradně k určenému účelu v rámci příslušných lékařských oborů a pouze kvalifikovaným, zdravotnickým vyškoleným personálem.

Při nesprávném skladování nebo manipulaci, která neodpovídá určenému účelu, může dojít ke zranění pacienta.

Skladujte při **pokojevé teplotě** a na místě chráněném před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením, jinak nelze zaručit sterilitu produktu.



Svorky na hadice vždy uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.

Vždy je nutné dodržovat uvedené doby použití. Prošlé produkty je nutné zlikvidovat.

Použití nadměrné mechanické síly může vést k poškození nástroje, což může ohrozit pacienta. Nechtěný pohyb pohyblivých částí může vést k poranění osoby, která nástroj používá.

Při opakovaném použití svorek na hadice hrozí biokontaminace a vyšší mikrobiální zátěž. Stejně riziko hrozí při použití nástrojů z poškozeného balení.



Jedná se o svěrný nástroj – při nesprávném zacházení nebo kontaktu se svěrnými čelistmi se může uživatel skřípnout nebo jinak zranit.

Nesprávná likvidace nástrojů vede ke znečištění životního prostředí. Viz část o správné likvidaci.

Účel

Jako praktický nástroj mají svorky na hadice mnoho využití v oblasti zdravotní péče i medicíny. Svorky na hadice slouží k uzavření různých hadiček z lékařského silikonu ve zdravotnictví a laboratorním prostředí.

Podle materiálu hadice je třeba zvolit čelist svorky – ta může být buď hladká, nebo s křížovým vroubkováním. Tím je zajištěno, že hadice může být bezpečně uchycena a sevřena, aniž by došlo k jejímu poškození.

Různorodé využití vedlo k zavedení celé řady tvarových variant těchto svorek. Příslušný tvar a velikost nástroje určují jeho zamýšlené použití.

Indikace: Použití při běžných chirurgických zákrocích v nemocnicích nebo lékařských ordinacích.

Kontraindikace: Použití je kontraindikováno v případě obecných známek neoperovatelnosti, dříve zmíněných přecitlivělostí nebo při zásazích do centrálního oběhového a nervového systému.

Cílová skupina pacientů: Sterilními svorkami na hadice lze ošetřovat všechny skupiny pacientů.

Zamýšlení uživatele: svorky na hadice smí používat výhradně vyškolený zdravotnický personál.

Výkonnostní charakteristiky

Svorky na hadice jsou opatřeny sterilní bariérou.

Správné použití

Svorky na hadice smí být používány výhradně k určenému účelu v rámci příslušných lékařských oborů a pouze kvalifikovaným, zdravotnický vyškoleným personálem. Svorky na hadice se používají pouze krátkodobě, tedy po dobu několika hodin.

Sterilita

Při poškození sterilního obalu již nesmí být svorky na hadice použity. Sterilní obal smí být otevřen teprve bezprostředně před použitím. V případě neúmyslného otevření nebo poškození sterilního obalu použijte prosím jiný produkt s neporušeným obalem.

Výrobek je sterilizován metodou s použitím ethylenoxidu.



Opětovné použití výrobku

Svorky na hadice jsou určeny pro jednorázové použití. Resterylizace je zakázána, protože pro tento proces neexistuje validovaný postup.

Likvidace

Při likvidaci potenciálně kontaminovaných produktů je nutné dodržovat předpisy pro prevenci infekcí a zacházení s mikrobiologickými riziky. To platí zejména pro svorky na hadice, které přišly do kontaktu s tkáněmi nebo tělesnými tekutinami.

Pro likvidaci je nutné dodržovat zákony a předpisy specifické pro danou zemi. Naše nástroje jsou licencovány k likvidaci prostřednictvím recyklačního systému Scholz (SReS©).

Datum vydání návodu k použití 20.05.2025

Verze: 3.0

Upozornění: Všechny závažné incidenty související s tímto produktem musí být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlí uživatel a/nebo pacient.