

Návod k použití lékařských nůžek na obvazy od společnosti Scholz Medical GmbH

Výrobce

Scholz Medical GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
83052 Bruckmühl
Německo
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
+49 8062 8070801



Tento návod k použití platí pro následující produkty.

Popis	Katalogové číslo	Základní UDI-DI:	Třída	Pravidlo
Nůžky na obvazy 140 mm	TABC8611	426052621TABC02X3	Is	5
Nůžky na obvazy 180 mm	TABC8499	426052621TABC02X3	Is	5
Nůžky na obvazy 200 mm	TABC8633	426052621TABC02X3	Is	5
Štípačky na dráty, 120 mm	TADP5511	426052621TABC02X3	Is	5

Varování/bezpečnostní opatření

Pokud existuje přecitlivělost na ethylenoxid nebo nerezovou ocel, doporučuje se před použitím produktu konzultace s lékařem.

Výrobek nesmí být používán na centrální oběhový systém ani na centrální nervový systém.

Nůžky na obvazy smí být používány výhradně k určenému účelu v rámci příslušných lékařských oborů a pouze kvalifikovaným, zdravotnický vyškoleným personálem.

Při nesprávném skladování nebo manipulaci, která neodpovídá určenému účelu, může dojít ke zranění pacienta.

Skladujte při **pokožkové teplotě** a na místě chráněném před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením, jinak nelze zaručit sterilitu produktu.



Nůžky na obvazy vždy uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.

Vždy je nutné dodržovat uvedené doby použití. Prošlé produkty je nutné zlikvidovat.

Použití nadměrné mechanické síly může vést k poškození nástroje, což může ohrozit pacienta. Nechtěný pohyb pohyblivých částí může vést k poranění osoby, která nástroj používá.

Při opakovaném použití nůžek na obvazy hrozí biokontaminace a vyšší mikrobiální zátěž. Stejně riziko hrozí při použití nástrojů z poškozeného balení.



Jedná se o řezný nástroj – při nesprávném zacházení nebo dotyku ostří se může uživatel poranit.

Nesprávná likvidace nástrojů vede ke znečištění životního prostředí. Viz část o správné likvidaci.

Účel

Jako praktický nástroj mají nůžky na obvazy mnoho využití v oblasti zdravotní péče i medicíny. Nůžky na obvazy slouží ke stříhání obvazového materiálu a umožňují přesnou práci. Nůžky na obvazy lze použít k přesnému prostřížení, oddělování i odstříhování obvazového materiálu. V závislosti na části těla a pevnosti obvazového materiálu mají čepele různou délku, zakřivení, úhel i způsob broušení.

Nůžky na obvazy jsou ručně ovládané, mechanické chirurgické nástroje určené ke stříhání obvazového nebo jiného materiálu. Tyto nůžky se skládají ze tří částí: čepelí s ostřím a hřbetem, držadlové části s kroužky nebo pružinami a uzavírací části se šroubem pro otevírání a zavírání nůžek. Názvy nůžek vycházejí z oblasti jejich použití nebo nesou jméno svého vynálezce.

Základní rozdíly mezi jednotlivými typy nůžek spočívají:

- ve tvaru ramen (rovná, zahnutá, kolenovitě zahnutá, úhlová),
- v délce a šířce čepelí,
- v provedení ostří (hladké nebo zoubkované),
- v zakončení čepelí, které může být špičaté, tupé nebo lžícovité, případně v jejich kombinaci (špička/špička, tupá/tupá, špička/tupá),
- v provedení prstenců, které mohou být stejně velké nebo rozdílné.

Konkrétní provedení jednotlivých modelů je uvedeno v názvu položky v produktovém seznamu.

Indikace: Použití při běžných chirurgických zákrocích v nemocnicích nebo lékařských ordinacích.

Kontraindikace: Použití je kontraindikováno v případě obecných známek neoperovatelnosti, dříve zmíněných přecitlivělostí nebo při zásazích do centrálního oběhového a nervového systému.

Cílová skupina pacientů: Sterilními nůžkami na obvazy lze ošetřovat všechny skupiny pacientů.

Zamýšlení uživatelé: nůžky na obvazy smí používat výhradně vyškolený zdravotnický personál.

Výkonnostní charakteristiky

Nůžky na obvazy jsou opatřeny sterilní bariérou.

Správné použití

Nůžky na obvazy smí být používány výhradně k určenému účelu v rámci příslušných lékařských oborů a pouze kvalifikovaným, zdravotnický vyškoleným personálem. Nůžky na obvazy se používají pouze krátkodobě, tedy po dobu několika hodin.

Sterilita

Při poškození sterilního obalu již nesmí být nůžky na obvazy použity. Sterilní obal smí být otevřen

teprve bezprostředně před použitím. V případě neúmyslného otevření nebo poškození sterilního obalu použijte prosím jiný produkt s neporušeným obalem.
Výrobek je sterilizován metodou s použitím ethylenoxidu.



Opětovné použití výrobku

Nůžky na obvazy jsou určeny pro jednorázové použití. Resterylizace je zakázána, protože pro tento proces neexistuje validovaný postup.

Likvidace

Při likvidaci potenciálně kontaminovaných produktů je nutné dodržovat předpisy pro prevenci infekcí a zacházení s mikrobiologickými riziky. To platí zejména pro nůžky na obvazy, které přišly do kontaktu s tkáněmi nebo tělesnými tekutinami.
Pro likvidaci je nutné dodržovat zákony a předpisy specifické pro danou zemi. Naše nástroje jsou licencovány k likvidaci prostřednictvím recyklačního systému Scholz (SReS®).

Datum vydání návodu k použití 20.05.2025

Verze: 3.0

Upozornění: Všechny závažné incidenty související s tímto produktem musí být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlí uživatel a/nebo pacient.