

Producent

Scholz Medical GmbH  
Robert-Bosch-Straße 1  
83052 Bruckmühl  
Niemcy  
<https://www.scholz-instruments.com/>  
info@scholz-medical.de  
+49 8062 8070801



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących produktów

Opis	Numer artykułu	Podstawowy UDI-DI	Klasa	Zasada
Nożyczki do bandaży 140 mm	TABC8611	426052621TABC02X3	Is	5
Nożyczki do bandaży 180 mm	TABC8499	426052621TABC02X3	Is	5
Nożyczki do bandaży 200 mm	TABC8633	426052621TABC02X3	Is	5
Nożyczki do drutu, 120 mm	TADP5511	426052621TABC02X3	Is	5

Ostrzeżenia/Środki ostrożności

W przypadku uczulenia na tlenek etylenu lub stal nierdzewną, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Produktu nie należy stosować na ośrodkowy układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy.

Nożyczki do bandaży mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem w środowisku medycznym przez przeszkolony personel posiadający kwalifikacje medyczne.

Niewłaściwe przechowywanie lub obchodzenie się z produktem niezgodnie z jego przeznaczeniem może spowodować uraz pacjenta.

Przechowywać w **temperaturze pokojowej**, w miejscu chronionym przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w przeciwnym razie nie można zagwarantować sterylności produktu.



Nożyczki do bandaży należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób nieupoważnionych.

Należy zawsze przestrzegać podanych czasów użytkowania. Przetknięte produkty należy zutylizować.

Nadmierne siły mechaniczne wywierane przez użytkownika mogą spowodować uszkodzenie produktu, co może skutkować obrażeniami pacjenta.

Ruchome części i ich niezamierzony ruch mogą spowodować obrażenia użytkownika.

Ponowne używanie nożyczek do bandaży może prowadzić do skażenia biologicznego i zwiększenia ilości bakterii. To samo dotyczy sytuacji, gdy przyrządy są używane pomimo uszkodzenia opakowania.



Są to nożyczki do bandaży ; w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi lub dotknięcia ostrzy, użytkownik może przeciąć się lub zranić w inny sposób.

Niewłaściwa utylizacja przyrządów prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej prawidłowej utylizacji.

#### Przeznaczenie produktu

Nożyczki do bandaży to ważne przyrządy o wielu zaletach, mające wiele zastosowań w służbie zdrowia i medycynie. Nożyczki do bandaży służą do cięcia materiałów opatrunkowych i umożliwiają precyzyjną pracę. Można ich używać do ostrego cięcia, rozpychania i przecinania materiałów opatrunkowych. W zależności od części ciała i wytrzymałości materiału opatrunkowego, ostrza mają różną długość, są zakrzywione, pod kątem i inaczej szlifowane.

Nożyczki do bandaży to ręczne przyrządy chirurgiczne przeznaczone do cięcia bandaży i innych materiałów. Nożyczki te składają się z trzech części: ostrzy tnących z krawędzią tnącą i grzbietem ostrza, części rękojeści z pierścieniami lub sprężynami oraz części blokującej ze śrubą (otwierającej i zamykającej nożyczki). Nazwy nożyczek wynikają z ich zakresu zastosowania lub odpowiadają osobie wynalazcy.

Zasadniczo nożyczki te różnią się

- w kształcie gałęzi (prostych, zakrzywionych, zgiętych w kolano, kątowych),
- w długości i szerokości liścia,
- w konstrukcji ostrza (gładkie lub ząbkowane),
- w konstrukcji końcówek ostrza, które mogą być spiczaste, tępe lub w kształcie szpatułki lub kombinacja końcówek ostrza spiczaste/spiczaste, tępe/tępe lub spiczaste/tępe,
- w projekcie pierścieni, które mogą być takie same lub różne

Poszczególne wersje artykułów można zobaczyć w opisie artykułu na liście artykułów.

**Wskazanie:** Stosować podczas rutynowych zabiegów chirurgicznych w szpitalach lub gabinetach lekarskich.

**Przeciwwskazanie:** Przeciwwskazaniem do stosowania jest ogólna niewydolność nerek, wyżej wymienione nietolerancje oraz wpływ na ośrodkowy układ krążenia i układ nerwowy.

**Grupa docelowa pacjentów:** Wszystkie grupy pacjentów mogą być leczone przy użyciu sterylnych nożyczek do bandaży

**Przeznaczenie:** nożyczki do bandaży przeznaczone są wyłącznie do użytku przez przeszkolony personel posiadający kwalifikacje medyczne.

#### Parametry działania

Nożyczki do bandaży posiadają sterylną barierę.

#### Prawidłowa aplikacja

Nożyczki do bandaży mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem w środowisku medycznym przez przeszkolony personel posiadający kwalifikacje medyczne. Nożyczki do bandaży są używane wyłącznie tymczasowo, tzn. przez okres krótszy niż jedna godzina.

#### Sterylność

Jeśli opakowanie sterylne ulegnie uszkodzeniu, nożyczek do bandaży nie wolno już używać. Opakowanie sterylne można otwierać wyłącznie bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia sterylnego opakowania należy zastosować inny produkt z nienaruszonym sterylnym opakowaniem. Produkt sterylizowany jest przy użyciu tlenu etylenu.



#### Ponowne wykorzystanie produktu

Nożyczki do bandaży są przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowna sterylizacja jest zabroniona, ponieważ nie istnieje żadna zatwierdzona procedura dla tego procesu.

#### Utylizacja

Przy utylizacji potencjalnie skażonych produktów należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania zakażeniom i postępowania z zagrożeniami mikrobiologicznymi. Dotyczy to w szczególności nożyczek do bandaży, które miały kontakt z tkanką lub płynami ustrojowymi. Przy utylizacji należy stosować się do przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju. Nasze przyrządy podlegają utylizacji w ramach Scholz Recycling System ( SReS©).

Data wydania instrukcji użytkownika 20.05.2025

Wersja: 3.0

Notyfikacja: Wszelkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownik i/lub pacjent.