

Návod k použití lékařských kleští od společnosti Scholz Medical GmbH

Výrobce

Scholz Medical GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
83052 Bruckmuehl
Německo
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
+49 8062 8070801



Tento návod k použití se vztahuje na následující výrobky

Popis	Č. výrobku	Basic UDI-DI	Třída	Předpis
Tamponové kleště Maier zahnuté s račnou 200 mm	TABF0599-200	426052621TABF01XG	Ila	7
Tamponové kleště Maier zahnuté s račnou 265 mm	TABF0599	426052621TABF01XG	Ila	7
Tamponové kleště Maier rovné s račnou 200 mm	TABF0588-200	426052621TABF01XG	Ila	7
Tamponové kleště Maier rovné s račnou 265 mm	TABF0588	426052621TABF01XG	Ila	7
Magillovy intubační kleště pro malé děti, 150 mm	TAAN3799	426052621TABF01XG	Ila	7
Magillovy intubační kleště pro děti, 200 mm	TAAN3800	426052621TABF01XG	Ila	7
Magillovy intubační kleště pro dospělé, 250 mm	TAAN3811	426052621TABF01XG	Ila	7
Kleště na odstraňování svorek	TABN7511	426052621TABF01XG	Is	5

Upozornění / bezpečnostní opatření

V případě nesnášenlivosti ethylenoxidu nebo nerezové oceli je třeba se před použitím výrobku poradit s lékařem.

Výrobek se nesmí používat u centrálního oběhového systému a centrálního nervového systému.

Kleště smí v lékařských oborech používat k určenému účelu pouze vyškolený personál se zdravotnickým vzděláním.

Nesprávné skladování nebo manipulace, které jsou v rozporu s určeným použitím, může mít za následek poranění pacienta.

Uchovávejte na místě chráněném před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením při pokojové teplotě, jinak nelze zaručit sterilitu výrobku.



Kleště vždy uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.

Vždy je třeba dodržovat stanovené doby použití. Výrobky po životnosti je nutné zlikvidovat.

Nadměrné mechanické síly vyvíjené uživatelem mohou výrobek poškodit a způsobit poranění pacientů.

Pohyblivé části a neúmyslný pohyb těmito částmi mohou způsobit poranění uživatele.

Opakované použití kleští může vést k biologické kontaminaci a zvýšení mikrobiálního znečištění. Totéž platí, pokud jsou výrobky používány navzdory poškozenému obalu.



Nesprávná likvidace nástrojů vede ke znečištění životního prostředí. Viz oddíl o správné likvidaci.

Stanovení účelu použití

Kleště jsou důležitým nástrojem s velkým přínosem, který má všestranné využití ve zdravotnictví a lékařství. Kleště se používají k bezpečnému uchopení nebo odstranění materiálu nebo k umístění sterilních lékařských nástrojů nebo spotřebního materiálu. Používají se také k odstranění cizích těles z těla pacienta. Kleště se používají také k intubaci nebo k zavádění či odstraňování tracheálních trubic a žaludečních sond ve spojení s laryngoskopem. K odstraňování cizích těles z úst a oblasti krku.

V závislosti na provedení se kleště používají k uchopení, sevření nebo upnutí tkáně nebo materiálu a jemnému odštípnutí zdravé tkáně. Tyto kleště se skládají z čelistí, žlábků, úchopových ploch a kroužků pro prsty.

Hlavní rozdíly mezi těmito kleštěmi jsou:

- ve tvaru branží (rovné, zahnuté, zkosené)
- ve způsobu, tvaru a uspořádání žlábků
- v délce upínacích čelistí a šířce
- v provedení způsobu upínání
- v provedení špičky

Kleště na odstraňování svorek se používají k pooperačnímu odstraňování chirurgických svorek a k uchopení materiálu a umístění sterilních lékařských nástrojů nebo spotřebního materiálu. Tím je zajištěno, že chirurgické nástroje zůstanou sterilní až do jejich použití, což zabraňuje infekcím. Odstranění chirurgických svorek také zabraňuje infekcím, protože v pacientovi nezůstávají cizí tělesa. Sterilita výrobků zabraňuje infekci pacienta nástrojem.

Indikace: Použití pro běžné chirurgické zákroky v nemocnicích nebo ordinacích lékařů.

Kontraindikace: Použití je kontraindikováno v případě celkové nesnášenlivosti, výše uvedených intolerancí nebo použití u centrálního oběhového a nervového systému.

Cílová skupina pacientů: Sterilními kleštěmi lze ošetřovat všechny skupiny pacientů..

Určení uživatelé: Kleště smí používat pouze vyškolený, zdravotnický kvalifikovaný personál.

Charakteristika

Pro kleště je k dispozici sterilní bariéra.

Správné použití

Kleště smí v lékařských oborech používat k určenému účelu pouze vyškolený personál se zdravotnickým vzděláním. Kleště se používají pouze krátkodobě, tj. po dobu maximálně několika hodin. Kleště lze použít dočasně i invazivně.

Sterilita

Pokud je sterilní obal poškozen, kleště se již nesmí používat. Sterilní obal se smí otevřít pouze bezprostředně před použitím. Pokud je sterilní obal náhodně otevřen nebo poškozen, použijte jiný výrobek s neporušeným sterilním obalem.

Výrobek je sterilizován procesem ethylenoxidu.



Opakované použití výrobku

Kleště jsou určeny k jednorázovému použití. Opětovná sterilizace je zakázána, protože pro tento proces neexistuje žádný validovaný postup.

Likvidace

Při likvidaci potenciálně kontaminovaných produktů je třeba dodržovat předpisy pro prevenci infekce a řešení mikrobiologických rizik. To platí zejména pro kleště, které přišly do kontaktu s tkáněmi nebo tělesnými tekutinami.

Při likvidaci je třeba dodržovat zákony a předpisy dané země. Naše výrobky mají licenci na likvidaci prostřednictvím systému Scholz Recycling System (SReS®).

Datum vydání návodu k použití 20.05.2025 , Version 3.0

Poznámka: Všechny závažné události týkající se výrobku hlase výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž se uživatel a/nebo pacient nachází.